

Snabbstartsguide


Signia TV Sound

TV-ljud i högkvalitativ stereo
direkt till dina Bluetooth®-
aktiverade Signia-hörapparater



Strömförsörjning till TV Sound


1. Använd den medföljande Micro USB-kabeln.
2. Anslut Micro USB-kabeln till TV Sound-enheten.
3. Anslut kabeln till USB-porten på din TV.
4. TV:n ska vara påslagen för att enheten ska fungera.

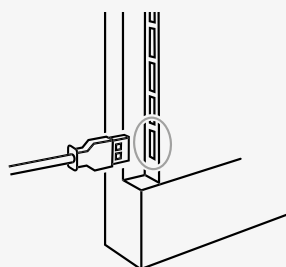

Anslut ljudkällan


Via analog kabel

1. Anslut TV Sound till strömkällan.
2. Anslut den analoga kabeln till den lila porten på baksidan av TV Sound.
3. Anslut kabelns andra ände till motsvarande ljudutgångar på din TV.
4. Slå på TV:n och starta ljudöverföringen.

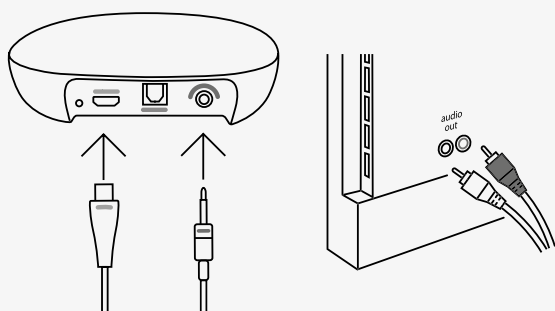

Via optisk kabel

1. Anslut TV Sound till strömkällan.
2. Anslut den optiska kabeln till den blå porten på baksidan av TV Sound.
3. Anslut kabelns andra ände till TV:ns "Optical OUT"-utgång.
4. Slå på TV:n och starta ljudöverföringen.

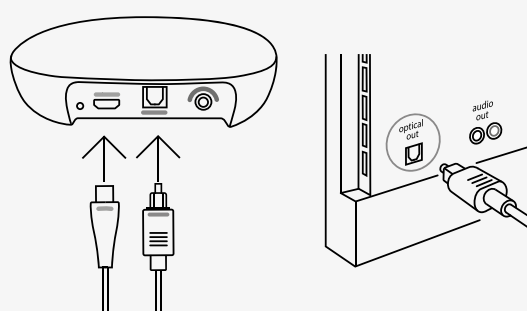

signia

Snabbstartsguide

Signia TV Sound

Parkoppla hörapparaterna med TV Sound

1. Slå på TV Sound.
2. Starta om hörapparaterna (stäng av och slå på apparaterna igen).
3. Placera hörapparaterna inom 0–20 cm från enheten:

- LED-lampan blinkar blått under parkoppling.
- LED-lampan lyser med fast blått sken när parkopplingen är klar.

TIPS: Om hörapparaterna redan är parkopplade med en annan enhet (t.ex. en mobil), se till att den enheten inte finns i närheten eller att dess Bluetooth® är avstängd under parkoppling.



Starta streaming med Signia-appen

Steg 1:

- Öppna Signia-appen
- Tryck på Stream i den nedre menyn

Steg 2:

- Tryck på Spela upp för att börja streama TV-ljudet

Steg 3:

- Justera volymen vid behov
- Tryck på Pausa för att stoppa ljudet

